

Los protocolos que se describen a continuación deben ser llevados a cabo únicamente por personal cualificado para la limpieza, desinfección y esterilización del material dental aquí especificado.

Instrucciones de limpieza y desinfección

Aplicable para instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas.

1 - Desmontaje

- Desmonte el instrumental que así lo requiera, como por ejemplo las carracas manuales, las fresas o los topes de fresa.
- Desmonte la caja quirúrgica o protésica en sus diferentes componentes para una correcta limpieza.

2 - Limpieza

- Sumerja el instrumental en una solución de producto limpiador indicado específicamente para instrumental dental que facilite la eliminación de los restos biológicos adheridos.

- Retire manualmente los restos biológicos con un cepillo suave y detergente de pH neutro.
- Aclare con agua abundante.
- Realice un aclarado final con agua desionizada.
- Para la limpieza de las cajas quirúrgicas y protésicas utilice siempre detergentes de pH neutro y utensilios no abrasivos para no dañar las superficies de las cajas.

3 - Desinfección

- Sumerja el instrumental en un producto desinfectante específicamente indicado para instrumental dental.

- Para la desinfección con equipo de ultrasonidos, sumerja el material en el baño de ultrasonidos.
- Aclare con abundante agua desionizada para eliminar los restos de desinfectante.
- Seque el material con aire comprimido filtrado.

4 - Inspección


- Compruebe que el instrumental está perfectamente limpio, de lo contrario, repita los pasos anteriores de limpieza y desinfección.
- Descarte el instrumental que muestre desperfectos y sustitúyalo para la siguiente cirugía.

- Verifique que el instrumental y las cajas quirúrgicas y protésicas están perfectamente secas antes de realizar su montaje y proceder a la esterilización.

IMPORTANTE

Siga las instrucciones del fabricante del equipo desinfectante para determinar las concentraciones y tiempos, así como del fabricante del equipo de ultrasonidos para determinar la temperatura, concentración y tiempos.


Desmontaje de carraca quirúrgica

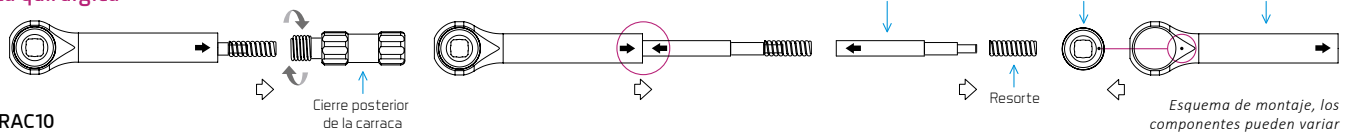

Ref.: NRAC10

Esquema de montaje, los componentes pueden variar

Desmontaje de carraca dinamométrica regulable

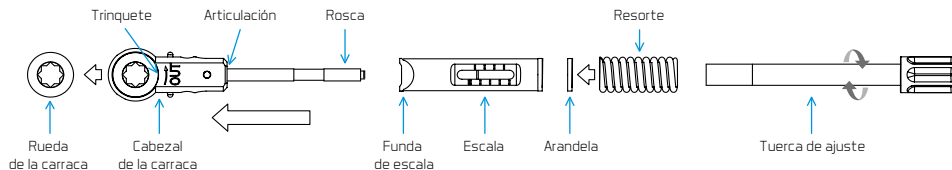

Ref.: TORK

NOTA: al desenroscar la tuerca se separan los componentes. Para hacer el montaje únicamente hay que colocar las piezas en el mismo orden y enroscar la tuerca de ajuste.

Esquema de montaje, los componentes pueden variar

Instrucciones de esterilización

Aplicable para implantes, aditamentos, instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas.

Esterilización en autoclave de vapor

- Introduzca el material de forma individual en bolsas de esterilización y a continuación selle las bolsas. Para una esterilización conjunta, coloque el instrumental en su caja quirúrgica, introduzca la caja en una bolsa de esterilización y selle la bolsa.
- Introduzca las bolsas a esterilizar en el autoclave.
- Esterilice en autoclave de vapor a 134°C/273°F (máx. 137°C/276°F) durante 4 min (mínimo) y 2 atm de presión.

Sólo para Estados Unidos: El ciclo de esterilización validado y recomendado en EE.UU debe ser realizado en autoclave de vapor, a 132°C/270°F, durante un tiempo mínimo de 15 minutos y con tiempo de secado de al menos de 15-30 minutos.

IMPORTANTE

Asegúrese de que completa la fase de secado establecida para evitar que los productos salgan húmedos.

Revise si el material o las bolsas de esterilización presentan humedad al finalizar la esterilización.

Realice el mantenimiento del autoclave con la periodicidad establecida y según las instrucciones del fabricante.

Conservación de los productos DentPross®

- Mantenga los productos en sus envases originales y en un ambiente seco y limpio hasta su uso.
- Tras su esterilización conserve los productos en las bolsas de esterilización selladas y en un ambiente seco y limpio.
- Nunca sobrepase las fechas de caducidad determinadas por el fabricante de las bolsas de esterilización.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante de las bolsas de esterilización.

Recomendaciones generales

- Nunca utilice material dañado o sucio ni reutilice productos indicados para un solo uso. El usuario es el responsable del correcto seguimiento de las instrucciones descritas en este documento.
- Preste atención a los elementos punzantes y cortantes. Se recomienda el uso de guantes durante la limpieza del material para evitar accidentes durante la manipulación.
- Siga las indicaciones de seguridad indicadas por el fabricante del agente desinfectante.
- La esterilidad no se puede garantizar si la bolsa de esterilización está abierta, dañada o mojada.
- Respete todas las fases del esterilizador. En caso de que el material o las bolsas de esterilización presenten restos de agua o humedad, revise el autoclave y seque las bolsas.
- Todos los implantes de ortodoncia, aditamentos, instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas de DentPross® se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser esterilizados siempre antes del primer uso clínico, siguiendo las indicaciones aquí señaladas y debiendo ser previamente extraídos de su envase original.
- El instrumental y las cajas quirúrgicas y protésicas deben ser siempre esterilizados previamente a su uso y limpiarse y desinfectarse con posterioridad.
- No limpie, desinfecte ni esterilice conjuntamente instrumental de diferente material.
- Los procesos de esterilización, limpieza y desinfección deterioran progresivamente el instrumental. Inspeccione el instrumental minuciosamente para detectar signos de deterioro.
- Para el correcto mantenimiento y seguridad de sus productos, NetPlus Medical SLU recomienda seguir estas instrucciones y por lo tanto la empresa no se hace responsable de la afectación que el empleo de procedimientos alternativos de limpieza, desinfección y esterilización por parte del usuario puedan tener en los productos.

